



Användarguide:

Operationsmunskydd med knytband

- A. Forma näsklämman. Placera operationsmunskyddet så att det täcker både din näsa och mun.
- B. Placera de övre knytbanden på övre baksdelen av ditt huvud och dra åt för att minimera luftläckage.
- C. Placera de nedre knytbanden runt nacken och dra åt.
- D. Vik alltid ut munskyddet helt för att minimera antal lager som du behöver andas igenom.
- E. Byt munskydd när det har kontaminerats samt mellan operationer.
- F. När det finns risk för vätskestänk, använd då ett 4-lagers stänksäkert operationsmunskydd med integrerat visir eller ett 4-lagers stänksäkert operationsmunskydd och skyddsglasögon eller visir.
- G. Släng operationsmunskyddet efter användning.