







Sådan bruges det aktive selvvarmende tæppe BARRIER® EasyWarm®

Rigtig brug



-  Åben pakken og fold tæppet helt ud **30 minutter** før brug
-  Start med at anvende tæppet **30 minutter** før operationen for at **holde kropstemperaturen**
-  Varmepuderne skal **vende opad**
-  Efter brug, **bortskaffes** tæppet som **almindeligt affald** (kan brændes)
-  Anvendes kun **under opsyn** af en sundhedsfaglig person
-  Patientens hud skal **tilses jævnlige**, især hvis der benyttes et tæppe oven på EasyWarm



Forkert brug



-  **Må ikke** anvendes på patienter med **stærkt nedsat perifer cirkulation***
-  Fold **ikke** tæppet **dobbelt**
-  Placer **ikke** tæppet **under patienten**
-  Læg **ikke vægt** på tæppet og brug **ikke fikseringsstroppe** ovenpå varmpuderne
-  **Må ikke** anvendes i forbindelse med **MR**. **Kan ikke** anvendes **under røntgen** på det område, der skal gennemlyses
-  Tæppet må **ikke** anvendes på børn og unge **under 18 år**

Bemærk: *inkl. huden, f.eks.: svær hypotension, hvor længerevarende hypotension kan forventes, svær perifer vaskulær sygdom, aortakirurgi - distal krydsafklemning af aorta, svært nedsat hjertefunktion/kardiogenisk chok.



1. Riv pakken op ved det forskårne punkt i det øverste venstre hjørne. Tag tæppet ud af pakningen for at eksponere BARRIER® EasyWarm® for ilt og derved starte varmeprocessen.



2. Fold BARRIER® EasyWarm® helt ud og læg det ikke dobbelt. Tæppet varmer sig selv op til en gennemsnitstemperatur på 40°C på 30 minutter, når der kommer ilt til tæppet. Temperaturen opretholdes i op til 10 timer.



3. Placer BARRIER® EasyWarm® med puderne opad. Ved kirurgiske indgreb over genitalia placeres tæppet over den nedre del af kroppen. Ved kirurgiske indgreb i det nedre abdominale område og nedre ekstremiteter, placeres tæppet over de øvre ekstremiteter og brystet.

Nøglefordele

- Hjælper med at forebygge hypotermi i det perioperative miljø¹
- Enkel og hurtig udpakning
- Enkel at bruge før, under og efter operationer
- Tæppet fungerer uden ekstra udstyr og skal ikke tilsluttes strøm

Referencer:

1. Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER® EasyWarm®, an active self-warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2013.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Molnlycke, BARRIER og EasyWarm varemærker, navne og logoer er registreret lokalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care Group of Companies. ©2018 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0151804


Molnlycke®