





BARRIER® variabelt hulstykke

- Væsketæthed i hele overfladen
- Integrerede klæbekanter
- Absorption i hele overfladen
- Variabel hulstørrelse til forskellige indgreb
- Let og hurtig drapering


Draperingsvejledning

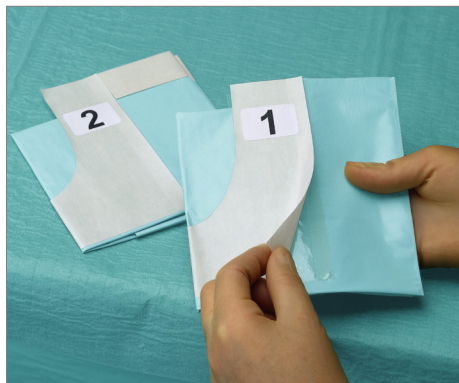

1. Fjern beskyttelsespapiret fra afdækning 1 og afdæk patienten.

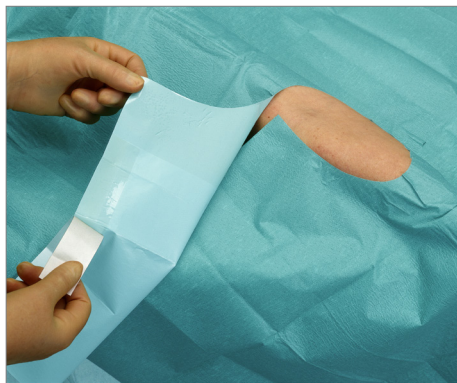

2. Fjern beskyttelsespapiret omkring hullet og kanten på afdækning 2.

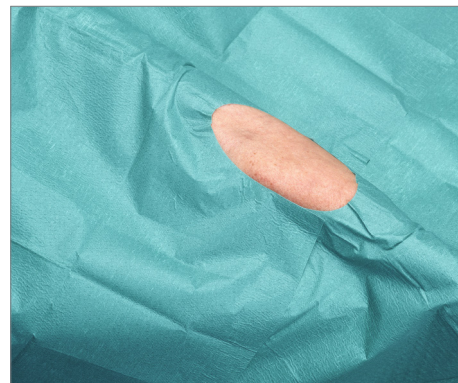


3. Afdæk patienten med det fleksible hulstykke.



4. Hullet kan variere i størrelse fra 0 - 20 eller 0 - 25 cm.

Variabelt hulstykke	Varenr. 706620 Str. (cm)	Varenr. 706630 Str. (cm)
Størrelse	50x75	75x100
Hulstørrelse	0 - 20	0 - 25
Pakning	40/240	30/180

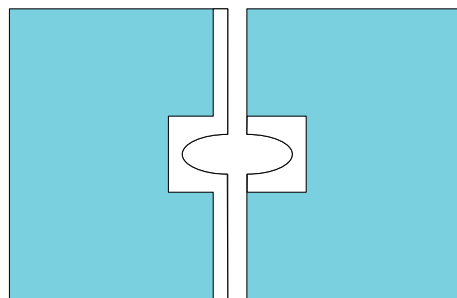

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0651709


Mölnlycke[®]