

Mölnlycke® BARRIER® afdækninger med klæb

Skaber en sikker forsegling for at isolere det sterile område og minimere bakteriel migration



Infektionskontrol på operationsstuen er vigtig for dig og dit team. Vi kan hjælpe dig. Vores BARRIER® afdækninger med klæb skaber en sikker forsegling rundt om incisionsfeltet - ved at isolere det sterile område med en barriere, der afgrænser det fra usterile områder - for at hjælpe dig med at beskytte dine patienter mod bakteriel migration.

Det er enkelt at fastgøre og fjerne BARRIER® afdækninger med klæb, hvis du følger disse trin:

Fastgørelse



1. Før afdækningen appliceres, skal huden være helt tør. Tør hud er et godt grundlag for sikker isolering af operationsfeltet.



2. BARRIER® klæb er trykfølsom. Tryk grundigt med hænderne mens du applicerer afdækningen, så klæbeområdet bliver på plads. Stræk ikke i klæbekanten.




3. For BARRIER incisionsfilm, skal første kontakt med huden være langs det planlagte incisionsområde. Tryk på filmen mens du applicerer den for at sikre god kontakt med huden. Derefter skal filmen glattes ud uden at strække i den. Start ved incisionsområdet og arbejd dig væk derfra for at undgå, at filmen krøller.



4. For BARRIER Flex holdes afdækningen let strukket mens du applicerer den til huden. Følg kropskonturerne mens du applicerer - tryk godt på filmen for at sikre hudkontakt. Derefter glattes filmen ud for at afslutte appliceringen.


Fjernelse

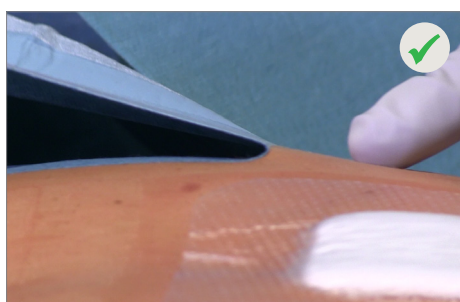

1. For at fjerne klæben, trækkes afdækningen forsigtigt tilbage i en 180 graders vinkel fra huden. Fasthold denne vinkel mens afdækningen trækkes væk fra huden.



2. For at minimere risikoen for hudskader eller smerte, kan du støtte huden ved siden af det klæbestykke, du fjerner, med din frie hånd.

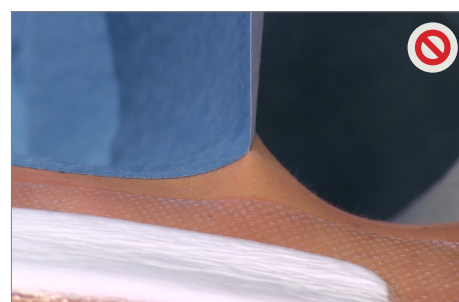

Minimer risikoen for blærer eller andre hudskader når du fjerner afdækningen: løft ikke afdækningen for meget opad/vinkelret på huden.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0061802


Mölnlycke®