

Lyofoam[®] MaxT

Højabsorberende polyuretan skumbandage til anvendelse omkring trakeostomituber

Polyuretan filmbagside


- Åndbar
- Brusetæt
- Bakterie- og virusbarriere

Åbning

- En tredjedel fra kanten af bandagen
- Optimal håndtering omkring trakeostomituben


Hydrofil polyuretan skum

- Høj absorptions- og retentionsevne
- Ikke-klæbende
- Blød, behagelig og nem at arbejde med

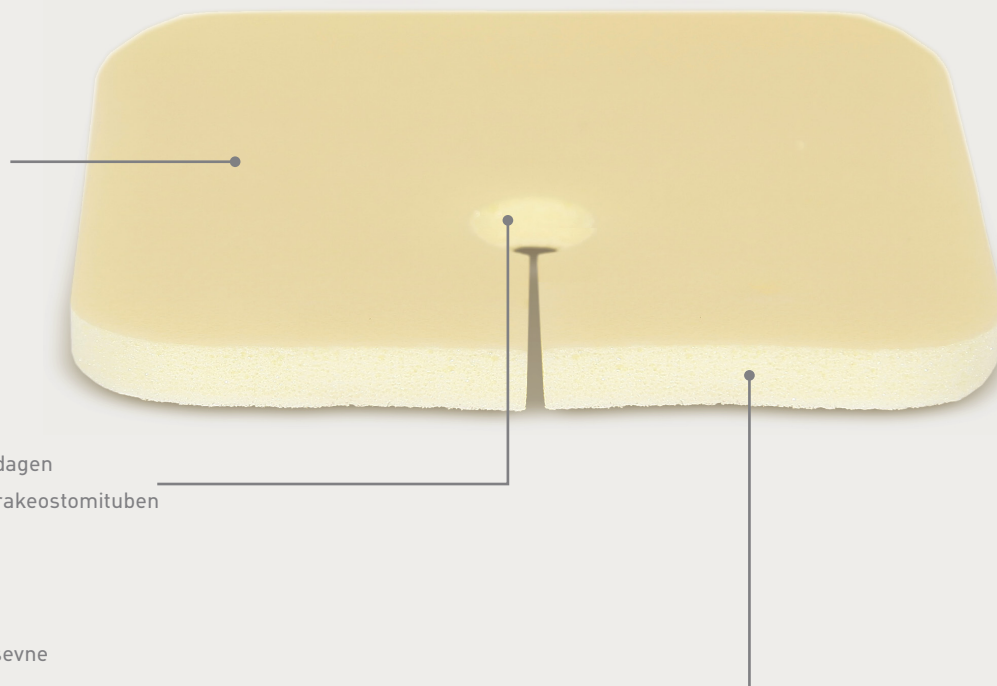


Lyof foam[®] Max T er en blød trakeostomi skumbandage, som absorberer ekssudat/sekret og beskytter huden omkring trakeostomituben.


Sådan anvendes Lyofoam® Max T

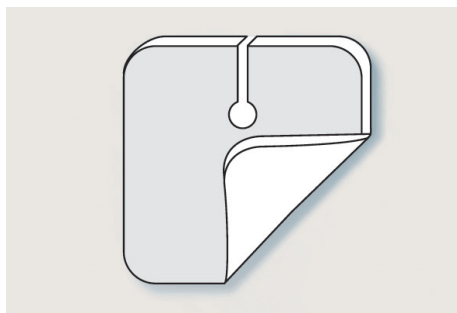

1. Rens huden omkring trakeostomituben. Tør området før du applicerer Lyofoam® Max T.

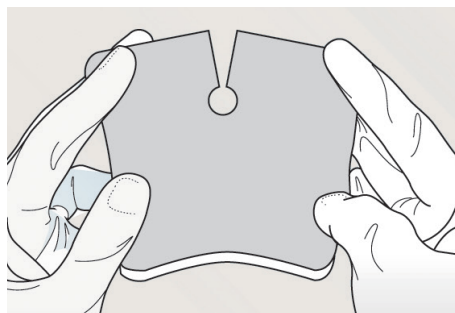

2. Applicér Lyofoam Max T med det forskårne hul omkring tuben og med det hvide skum vendt mod patientens hals.

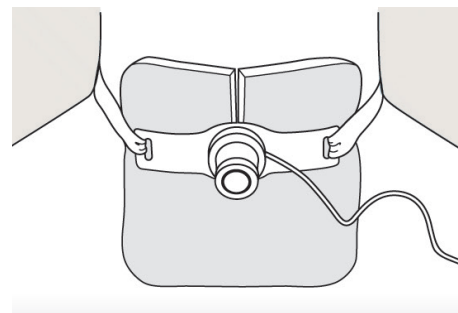

3. Hvis fiksering er nødvendig, kan tape anvendes. Tæpen bør kun appliceres til kanten af Lyofoam Max T.

Anvendelsesområde

Lyofoam Max T er udviklet til anvendelse omkring trakeostomituben for at sikre absorption og beskyttelse.

Skiftetfrekvens

Lyofoam Max T bør skiftes i følge klinisk praksis eller når bandagen er mættet.

Fordele ved Lyofoam Max T

- Høj absorptions- og retentionsevne
- Minimerer risikoen for maceration og lækage og kan blive siddende på i længere tid
- Brusetæt bagsidefilm, der fungerer som en barriere mod bakterie- og virus gennemtrængning
- Beskytter huden omkring trakeostomituber
- Nem at applicere og fjerne
- Blød og behagelig for patienten
- Ikke sensibiliserende



Lyofoam Max T er pakket i sterile engangspakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
603207	9 x 9	10	60

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke og Lyofoam varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
© 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0331808


Mölnlycke®