


Mepore® Film

Åndbar, transparent
selvklæbende filmbandage

Støttende beskyttelsesfolie og papirramme, der gør appliceringen lettere

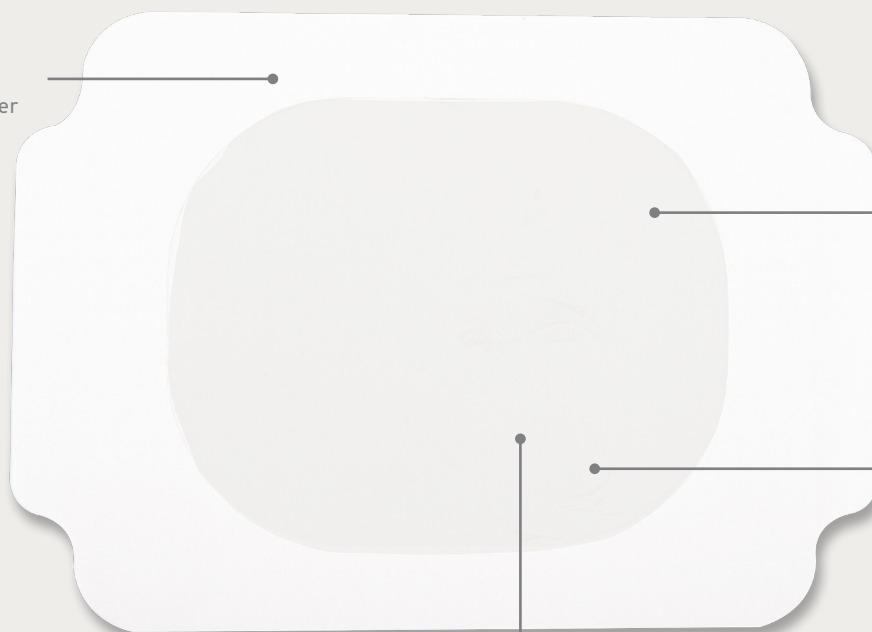

Transparent, åndbar, elastisk polyurethanfilm, der giver patientkomfort og et optimalt sårhelingsmiljø

Film med bakterie- og virusbarriere* der er uigennemtrængelig for væske, giver sikkerhed og beskyttelse

Hudvenlig polyakrylat klæb som giver en blid og sikker fiksering

* Mikrober større end 25 nm

Mepore® Film er en transparent, selvklæbende filmbandage, der er ideel som sekundær fikseringsbandage og som primærbandage til en lang række rene sår. Appliceringssystemet til Mepore Film er enkelt og brugervenligt.


Sådan anvendes Mepore® Film



1. For størrelserne 10 x 25 cm og 15 x 20 cm: Fjern det udskårne papir i midten.



2. Fjern beskyttelsesfolien (påtrykt Mepore) så klæben ses.

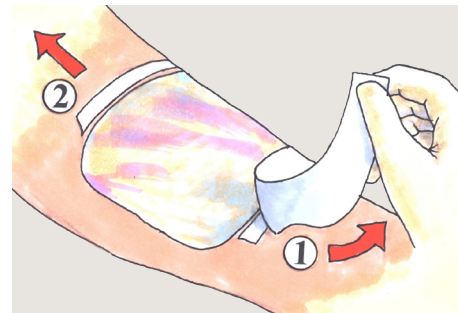

3. Applicér bandagen og glat den ud på huden. Fjern de to hvide papirsidede flapper. Stræk ikke bandagen, når du applicerer den!

Sådan virker Mepore Film

Mepore Film former sig efter kroppens konturer, beskytter såret og fungerer som en barriere mod lækage og bakteriel kontaminering.

Mepore Film opretholder et fugtigt sårmiljø samtidig med, at den høje permabilitet sikrer, at overskydende fugt fordamper fra såret og den omkringliggende hud.

Anvendelsesområder

Mepore Film kan anvendes som en fleksibel fikseringsløsning af primærbandagen som f.eks. en hydrogel-, alginat- eller skumbandage.

Mepore Film er desuden beregnet til en række forskellige rene sår i granulationsfasen, f.eks.:

- Overfladiske brandsår
- IV-steder
- Hudafkrabninger
- Snitsår
- Donorsteder
- Overfladiske tryksår
- Lukkede, kirurgiske sår
- Forebyggelse af hudlæsioner



Fordele ved Mepore Film

- Høj åndbarhed
- Nem applicering, også med handsker på
- Begrænser risikoen for skader på nydannet væv
- Tilpasser sig nemt efter kropskonturerne
- Hudvenlig klæb
- Sikker fiksering
- Opretholder et fugtigt sårmiljø
- Bakterie- og virusbarriere*, der danner en barriere mod lækage
- Ikke permeabel for væske

* mikrober større end 25 nm

Bemærk

Mepore Film bør ikke anvendes på dybe sår, der involverer muskler, sener, knogler eller tredjegradsforbrændinger. Mepore Film bør ikke appliceres på patienter, der er overfølsomme overfor klæbemidler af akryl.

Mepore Film, er pakket sterilt i enkeltpakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt
270600	6 x 7	100	600
270670	6 x 7	10	50
271500	10 x 12	70	210
271570	10 x 12	10	70
272500	10 x 25	20	100
272570	10 x 25	10	50
273000	15 x 20	10	50
273500	20 x 30	5	30

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf. 48168268, info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Mepore varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0411812


Mölnlycke®