

# Mepore®

## Selvklæbende absorberende bandage

Brugervenligt beskyttelses-  
papir, der er let at fjerne

Blødt, elastisk nonwoven-  
materiale med høj  
åndbarhed giver større  
patientkomfort

Absorberende sårpude  
med et lethæftende  
sårkontaktlag giver  
bedre patientkomfort og  
lavere skiftfrekvens

Hudvenlig, vandbaseret,  
opløsningsfri klæb giver en  
blid og sikker fiksering

Mepore® er en luftgennemtrængelig, selvklæbende bandage, ideel til let til moderat væskende sår. Den hudvenlige, vandbaserede, opløsningsfri polyakrylatklæb giver en blid og sikker fiksering.

## Sådan anvendes Mepore®



1. Tag fat i de overlappende dele af beskyttelsesfilmen og træk indtil klæbefladen ses og fiksering kan påbegyndes.



2. Placer bandagen på huden uden at strække den, og fjern forsigtigt resten af beskyttelsesfilmen.



3. Glat klæbekanten for at sikre optimal hæftning til huden.

## Sådan virker Mepore

Den porøse struktur i nonwoven materialet sikrer, at luft og damp kan trænge igennem. Materialet er fleksibelt, former sig efter kroppens konturer og tillader bevægelighed. Mepore er væskeafvisende og danner en barriere mod blod og væskegennemsvivning. Polyakrylat klæben er blid mod huden og sikrer samtidig en sikker fiksering. Sårkontaktlaget reducerer risikoen for, at bandagen hænger i såret. Det brugervenlige beskyttelsespapir tillader steril applicering, og forenkler appliceringen af bandagen.

## Fordele ved Mepore

- Hudvenlig, vandbaseret klæb
- Det lethæftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at bandagen hænger fast i såret
- Flexibel, væskeafvisende bagside
- Let aftageligt beskyttelsespapir, som letter håndteringen og giver aseptisk applicering
- Luftgennemtrængelig, forhindrer maceration og giver en bedre komfort
- Afrundede hjørner giver sikker fiksering (alle størrelser op til 9x15 cm)

## Anvendelsesområder

Mepore® kan anvendes på en lang række sår, som har let til moderat væskniveau. Disse omfatter kirurgiske sår, mindre brandsår, rifter og hudafskrabninger.

## Bandageskift

Skiftetrekvensen afhænger af sårets tilstand. Bandagen aftages ved at tage fat i kanten og langsomt trække den af i hårvækst retningen.

## Forholdsregler

For at sikre, at der ikke opstår hudskader, bør Mepore ikke strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.

## Mepore er pakket i sterile enkelt pakninger

Varenr.	Str. cm	Sårpudestr. cm	Stk/ inderkrt.	Stk/trp. krt.
670800	6 x 7	3 x 4	60	480
670900	9 x 10	4,5 x 6	50	400
671000	9 x 15	4,5 x 10	50	400
671100	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671170	9 x 20	4,5 x 15	5	70
671200	9 x 25	4,5 x 20	30	180
671300	9 x 30	4,5 x 25	30	270
671400	9 x 35	4,5 x 30	30	180

Mepore leveres også usterilt i 5 og 2 meters ruller i dispenserboks

Varenr.	Str. cm	Sårpudestr. cm	Stk/trp.krt.
5 meter rulle			
331900	4	1,5	24
332000	7	3	18
2 meter rulle			
331980	4	1,5	30
332080	7	3	21

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com). Mölnlycke og Mepore varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0231808

  
**Mölnlycke®**