

Mepilex® Border Lite


Mousse siliconée Safetac®, mince, auto-adhérente et absorbante

Pellicule externe à perméabilité dynamique

- À l'épreuve des virus, des bactéries et de l'eau
- Maintient l'humidité de la plaie
- Permet la douche

Couche de silicone molle Safetac®

- Ne colle pas aux plaies humides
- Adhère délicatement au pourtour
- S'enlève sans trauma ni douleur

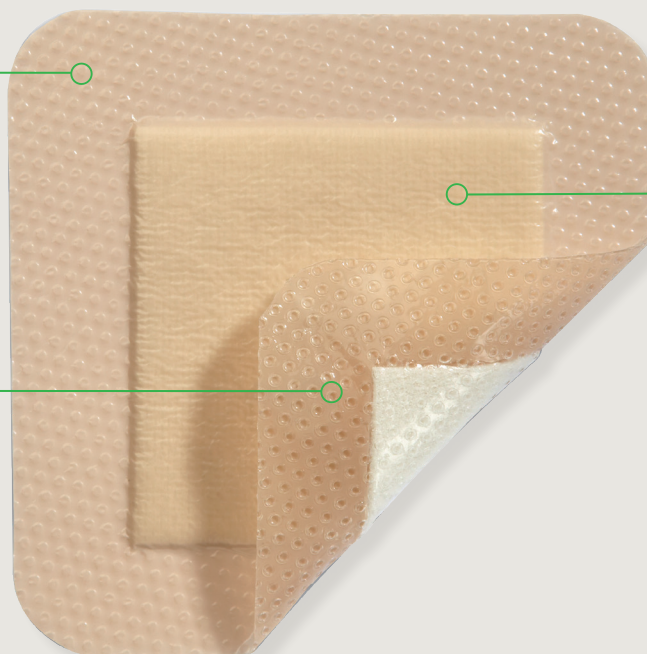

Coussinet de mousse absorbante

- Absorbe l'exsudat
- Construction stratifiée améliorant l'absorptivité et empêchant les fuites
- Conserve son intégrité
- Épouse les formes

Safetac®
TECHNOLOGIE

- Atraumatique pour la plaie et son pourtour
- Pansement de mousse intégral, mince et souple, issu de la technologie Safetac®
- Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque de macération

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac®, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.


*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Safetac®
TECHNOLOGIE


Mepilex® Border Lite


Mölnlycke®

Application de Mepilex® Border Lite

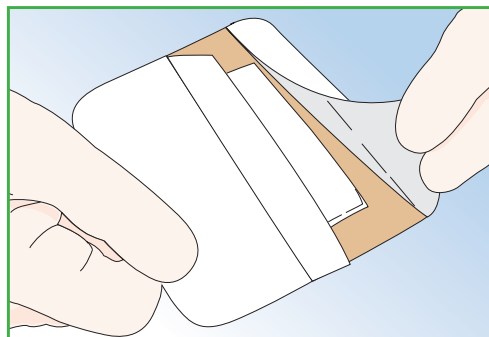

1. Nettoyer soigneusement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un format qui permet à la bordure adhésive de dépasser la plaie d'au moins 2 cm. Retirer le pellicule.

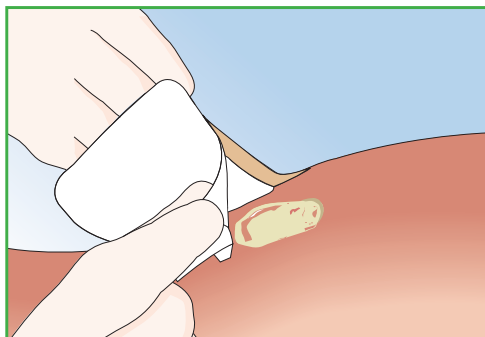

2. Placer le coussin en mousse sur la plaie. Lisser doucement la bordure adhésive en place. Ne pas étirer. Mepilex® Border Lite peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon le suintement et l'état de la plaie.

Mode d'action de Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite est un pansement de mousse siliconée très souple et mince qui absorbe de petites quantités d'exsudats et maintient un milieu humide sur la plaie. Il adhère délicatement à la peau péri-lésionnelle sans coller aux plaies humides, ce qui minimise les traumatismes à la plaie et l'inconfort du patient.

Avantages de Mepilex® Border Lite

- Minimise le trauma et la douleur associés au renouvellement du pansement
- Pansement complet
- Mince et translucide; solide et sécuritaire
- Résiste aux virus, aux bactéries et à l'eau ; protège patients et cliniciens
- Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours
- Minimise le risque de macération

Sélection Mepilex® Border Lite (Emballage stérile)

No d'article	Format cm	Pcs/boîte	Pcs/caisse
281000	4 x 5	10	70
281100	5 x 12,5	5	65
281200	7,5 x 7,5	5	70
281300	10 x 10	5	50
281500	15 x 15	5	50

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Indications*

Mepilex® Border Lite est indiqué dans le traitement de nombreuses plaies non exsudatives ou faiblement exsudatives telles que les ulcères de pied et de jambe les escarres et les plaies traumatiques, ex : dermabrasions, blessures aux doigts phlyctènes et déchirures cutanées.

Mepilex® Border Lite peut aussi être utilisé comme protection, notamment sur peau lésée et/ou fragilisée.

Précautions*

Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à l'un de ses composants.

En présence de signes cliniques d'infection, consulter un professionnel de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux adapté.

Ne pas associer Mepilex® Border Lite avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite et le peroxyde d'hydrogène. .

