




## BARRIER® Laparoskopioppdekking

- Alt-i-ett design med relevante, integrerte egenskaper
  - rask og enkel å drapere for en person
  - sparer tid
  - reduserer risikoen for kontaminering
- BARRIER® Flex fleksibel selvklebende limekanter for å opprettholde en sikker forsegling når abdomen blåses opp
- Fire integrerte poser og slangeholdere for et organisert arbeidsområde
- Integrerte, dype poser som er tilpasset laparoskopiske instrumenter
- 100% barriæretett materiale for optimal pasientssikkerhet

# Oppdekkingsveiledning



1. Legg merket til retningen på piktogrammet på oppdekkingen. Fjern beskyttelsespapiret.

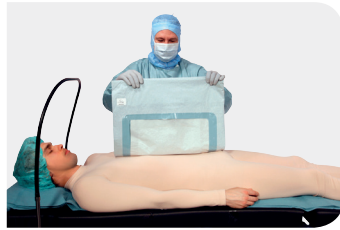

2. Sentrer oppdekkingen på pasienten.



3. Trykk forsiktig for å feste limekantene. Fold den ut mot deg selv og deretter vekk fra deg selv.



4. Fold oppdekkingen helt ut over bena...



5. Fold oppdekkingen helt over anestesibøylen.



6. Oppdekkingen er fullført.



7. Bruk de integrerte posene og slangeholderne til å organisere et effektivt arbeidsområde.

Art.nr.	ProcedurePak komponent
954226	Laparoskopilaken 200/250 x 340 cm, selvklebende hull 32x30 cm

Finn ut mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70  
Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care, BARRIER® og ProcedurePak® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. HQU0102

