

INSTRUÇÕES DE USO

TUBIFAST COM 2-WAY STRETCH

Nome técnico: Bandagem

Nome comercial: Tubifast com 2-Way Stretch

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico não estéril”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Modelo Comercial	Tipo de produto	Tamanho nominal (cm x m)	Variação Largura em repouso(cm)	Variação Largura esticada (cm)	Variação Comprimento (m)
2434	Tubifast com 2-Way Stretch - Vermelho	3 x 10	3 - 4,5	14 - 18	10 - 10,6
2436	Tubifast com 2-Way Stretch - Verde	5 x 10	5,0 - 6,5	19,5 - 24,5	10 - 10,6
2438	Tubifast com 2-Way Stretch - Azul	7,5 x 10	7,5 - 9,5	30 - 36	10 - 10,6
2440	Tubifast com 2-Way Stretch - Amarelo	12 x 10	12 - 13,5	41 - 49	10 - 10,6
2444	Tubifast com 2-Way Stretch - Roxo	19 x 10	19 - 23	76 - 86	10 - 10,6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E MODO DE AÇÃO

Tubifast com 2-Way Stretch é composto por viscosa, elastano e poliamida.

O produto mantém curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, ajudando na prevenção de maceração.



Indicação de Uso

Tubifast com 2-Way Stretch é uma bandagem de malha lisa, projetada para manter curativos no lugar em qualquer parte do corpo. O produto também pode ser utilizado como uma cobertura dermatológica leve em técnicas de cobertura seca ou úmida.

O Tubifast com 2-Way Stretch é indicado para rápida retenção do curativo, para o tratamento do eczema atópica como parte da técnica de enfaixamento (seca ou úmida) e como uma malha tubular .

Instruções de uso

Para cobrir curativos:

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast e cortar a medida, se necessário.
2. Esticar Tubifast com ambas as mãos e cobrir o curativo.
3. Tubifast pode ser aplicado em camada dupla para uma segurança extra.

Para cobrir emplastos:

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast para cobrir a área afetada. Cortar a medida, se necessário.
2. Lavar a área afetada e secar suavemente.
3. Sempre que indicado por um profissional de saúde, usar uma preparação tópica adequada sobre as áreas mais danificadas.
4. Aplicar, com movimentos descendentes, um emoliente adequado sobre a pele.
5. Aplicar Tubifast na área afetada.
6. No caso de cobertura úmida, aplicar duas camadas de Tubifast. Embeber a primeira camada em água quente e limpa, retirar o excesso de água e aplicar enquanto estiver quente e úmida. Um Tubifast seco pode então ser aplicado como camada superior.
7. Como alternativa a cobertura úmida, Tubifast pode ser aplicado como uma única camada seca sobre o emoliente para ajudar a manter o mesmo no lugar por mais tempo.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente se utilizado juntamente com produtos à base de parafina.

Em caso de sujidades devido a fluidos corporais, proceda à sua eliminação e devida substituição

No caso de cobertura úmida ou seca, deixar de utilizar se o eczema ficar infectado ou se piorar, solicitar imediatamente aconselhamento médico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em condições secas e temperatura entre 0º e 35ºC.

Transportar o produto em sua embalagem original.

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem.

REGISTRO ANVISA: 80733280009

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

IMPORTADOR:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP

CEP: 06696-060

E-MAIL: kaynara.cordeiro@molnlycke.com

CNPJ: 12.600.168/0001-17

Fabricante Legal:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 - Suécia

Fabricado no Reino Unido