

BARRIER® Axellakan för halvsittande position



- Integrerad vätskeuppsamlingspåse för en effektiv vätskehantering
- Allt-i-ett-konstruktion i generös storlek för axelkirurgi utförd i operationsstol/sittande läge
- Optimal vikning för aseptisk applicering
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet



1. Börja med att applicera slitslakanet på patienten.



2. Placera slitslakanet på operationsområdets bredaste del.



3. Applicera ortopedistrumpan



4. Vik ut operationslakanet en gång, ta sedan patientens hand och dra den genom öppningen.



5. Ta bort skyddspapperet och placera det elastiska hålet så högt som möjligt på axeln. Vik ut draperingen.



6. Vik ut lakanet mot patientens fötter och sedan över patientens huvud mot anestesibågen.



7. Justera vätskeuppsamlingspåsen till önskat läge. Utsläppsventilen kan anslutas till sugslangar om så krävs.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiionsyta	Avd./Trp.
60003	Axelset för halvsittande position: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Slitslakan (plast), slits 15 x 61cm 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Axellakan för halvsittande position, elastiskt hål 10 x 10cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 193cm 22 x 75cm 9 x 49cm 400 x 240cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	4 / 8
60004	Axellakan för halvsittande position, elastiskt hål 10 x 10cm	400 x 240cm		6 / 12

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70004	Axellakan för halvsittande position, elastiskt hål 10 x 10cm	400 x 240cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0291803