


# BARRIER® Extremitetslakan med Drisite® Plus



- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att drapera
- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet

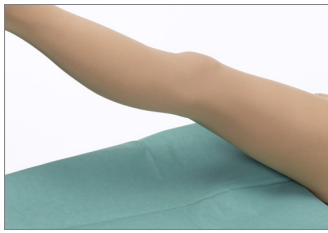

1. Vik ut instrumentbordslakanet och placera det under patientens



2. Alt. 1: Täck benet med den självhäftande handduken och fixera med op-tejp.



3. Alt. 2: Klä in benet i ortopedistrumpan.



4. Fixera den med op-tejp.



5. Placera det hopvikta extremitetslakanet över patientens fot med riktningsspilen riktad mot huvudändan.



6. Vik ut ena sidan av operationslakanet och överräck det till en assistent. Lyft patientens ben och dra extremitetslakanet upp över patientens knä. Vik ut sidorna på operationslakanet.



7. För in handen genom det elastiska hålet, fatta tag i patientens fot och för lakanet upp över knäleden.



8. Vik ut operationslakanets övre del över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtionsyta	Avd/Trp
60200	Extremitetsset: 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	200 x 300cm 150 x 190cm	75 x 190cm	7 / 14
60202	Extremitetsset: 1 x Op-tejp 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	9 x 49cm 230 x 315cm 150 x 190cm	75 x 190cm	7 / 14
60203	Extremitetsset: 1 x Instrumentbordslakan 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	150 x 190cm 200 x 300cm 150 x 190cm	75 x 190cm 75 x 190cm	7 / 14
60204	Extremitetsset: 1 x Instrumentbordslakan 2 x Op-tejp 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	150 x 190cm 9 x 49cm 250 x 315cm 150 x 190cm	75 x 190cm 75 x 190cm	6 / 12

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtionsyta	Avd/Trp
60205	Extremitetsset: 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 2 x Op-tejp 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan 1 x Omslagspapper	18 x 25cm 150 x 190cm, 9 x 49cm 230 x 315cm 150 x 190cm 100 x 100cm	75 x 190cm 75 x 190cm	6 / 12
60208	Extremitetsset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 1 x Häftande op-handduk 2 x Op-tejp 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 190cm 75 x 75cm 9 x 49cm 230 x 315cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	5 / 10
60209	Extremitetsset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 190cm 22 x 75cm 9 x 49cm 230 x 315cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	5 / 10
60210	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm	250 x 315cm		9 / 18
60211	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm	200 x 300cm		11 / 22
60212	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm, inslagen	230 x 315cm		10 / 20
60213	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm	230 x 315cm		10 / 20

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

ARt. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70210	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm	250 x 315cm
70211	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm	200 x 300cm
70213	Extremitetslakan, elastiskt hål 7cm	230 x 315cm

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0401803

