

# BARRIER® Knäartroskopilakan



- Integrerad vätskesamlingspåse för en effektivare hantering av vätska
- 100% vätsketätt material som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att klä patienten
- Passar även för användning på ett lutande bord



1. Vik ut instrumentbordslakanet och placera det under patientens ben.




2. Täck benet med ortopedi-strumpan. Vik upp det absorberande komfortskiktet på ortopedstrumpan på sig själv för att undvika risken för mikrobiell överföring.




3. Fixera med op-tejp.



4. Placera det hopvikta artroskopi-lakanet över patientens fot på det sätt som framgår av instruktionsetiketten. För in handen genom den elastiska öppningen, fatta tag i patientens fot och dra den igenom öppningen.

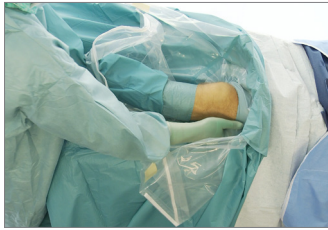

5. Vik ut den nedre delen av lakanet under patientens ben och placera de två elastiska hålen i önskat läge runt knät.

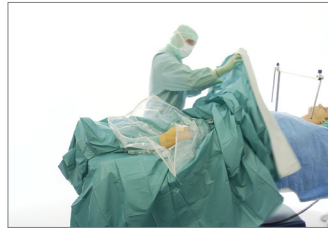

6. Vik ut den övre delen av lakanet helt mot huvudet. Använd de häftande lapparna för att fästa påsen.



7. Placera benet i önskad position för operationen. Operationslakanet kan också användas då operationsbordets fotända är nedvikt.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiönsyta	Avd./Trp.
60101	Knäartroskopiset: 1 x Knäartroskopilakan, elastiskt hål 7 and 5cm 1 x Instrumentbordslakan	230 x 320cm 150 x 190cm	75 x 190cm	5 / 10
60102	Knäartroskopiset: 1 x Assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Knäartroskopilakan, elastiskt hål 7 and 5cm 1 x Instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 190cm 22 x 75cm 9 x 49cm 230 x 320cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	4 / 8
60104	Knäartroskopilakan, elastiskt hål 7 and 5cm	230 x 320cm		5 / 10
60105	Knäartroskopilakan, elastiskt hål 7 and 5cm, inslagen	260/300 x 320cm		5 / 10

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70104	Knäartroskopilakan, elastiskt hål 7 and 5cm	230 x 320cm
70105	Knäartroskopilakan, elastiskt hål 7 and 5cm, inslagen	260/300 x 320cm

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0321803

Mölnlycke®