

Förbättrade egenskaper på våra förband

Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel

Optimerad **sårdyna, vidhäftning och försegling** för bättre skydd av högriskområdet i sakrum¹

Mepilex®
Border
Sacrum

Optimerad form för **bättre täckning** av högriskområden¹

Tydliga flikar underlättar för användaren vid återapplicering av förbandet

Samma unika uppbyggnad i **5-lager**



Förstärkta **kanter** för enklare hantering¹

Täcker malleolerna för bättre skydd¹

Mepilex®
Border
Heel

Samma fantastiska produkt:

- ✓ Samma uppbyggnad i 5-lager
- ✓ Samma material
- ✓ Samma vidhäftande ytor
- ✓ Samma skyddande förbandsstruktur
- ✓ Samma evidens för trycksårsprevention



Förbättrade användaregenskaper:

- ✓ Tydliga flikar för enklare hantering
- ✓ Flikar för extra försegling mellan skinkorna (Mepilex Border Sacrum)
- ✓ Förstärkt kant för enklare hantering¹
- ✓ Optimerad form för bättre skydd i högriskområden¹

Vad användarna säger

Mepilex Border Sacrum bedömdes upp till **28% mer lätthanterligt** jämfört med andra förband som finns tillgängliga i dag¹



Mepilex Border Heel bedömdes upp till **65% mer lätthanterligt** jämfört med andra förband som finns tillgängliga i dag¹



Fördelar

- ✓ Flikar för enklare kontroll av huden
- ✓ Något kraftigare kant för enklare hantering och bättre vidhäftning
- ✓ Självhäftande – ingen sekundär fixering behövs
- ✓ Mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten²⁻⁴
- ✓ Kan sitta på plats i flera dagar
- ✓ Kan justeras och återappliceras utan att förlora sina vidhäftande egenskaper


För prevention

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum bidrar till att skydda huden från skador orsakade av tryck, skjuv, friktion och mikroklimat⁵. Vidhäftningen med Safetac® skyddar huden, håller förbandet på plats samt begränsar friktion och skjuv². Safetac® möjliggör även repositionering av förbandet efter hudinspektion.

För behandling

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum absorberar och håller effektivt kvar sårvätskan i förbandet¹ samt bevarar en fuktig sårmiljö. Safetac® förseglar sårkanterna, förhindrar sårvätska från att läcka ut på den omgivande huden och minskar därmed risken för maceration⁶. Tack vare Safetac® kan förbandet bytas utan att såret eller den omgivande huden skadas¹ och utan att patienten utsätts för ytterligare smärta³.

Var uppmärksam på korrekt applicering av förbanden. Appliceringsguider finns.

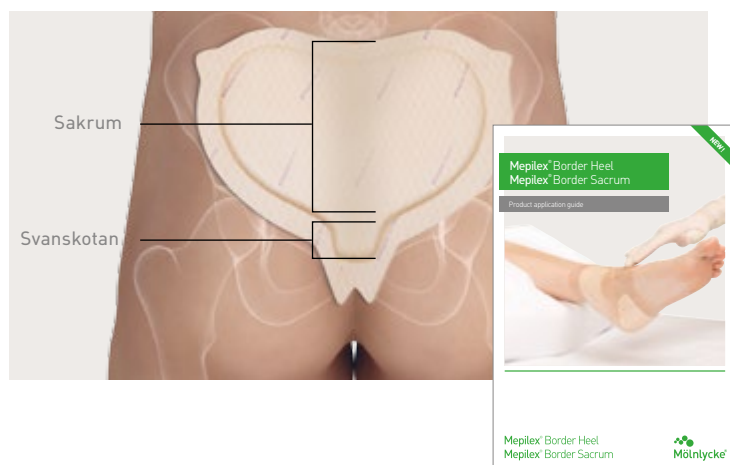

Riktlinjer för applicering

Mepilex® Border Sacrum

| Artikelnummer | Storlek [cm] | Antal/Avd fp | Antal/Trp fp |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 282450 | 22 x 25 | 5 | 30 |
| 282050 | 16 x 20 | 5 | 40 |
| 282500 | 15 x 15 (Gammal design) | 5 | 50 |

Levereras steril, enstycksförpackade

Mepilex® Border Heel

| Artikelnummer | Storlek [cm] | Antal/Avd fp | Antal/Trp fp |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 282750 | 22 x 23 | 6 | 30 |

Levereras steril, enstycksförpackade

Referenser: 1 Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. White R et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 4. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001 5. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHs, Toronto, Canada, 2008

www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, 402 52 Göteborg. Tel. 031 - 722 30 00.
Mölnlycke och Mepilex är varumärken, namn och logotyper som globalt är registrerade av Mölnlycke Health Care AB eller annan juridisk person inom samma koncern som Mölnlycke Health Care AB. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQPR0015

Mölnlycke®